

ANIOS RHW

Instrumentārija
skalošanas līdzeklis ar
lubrikatora efektu



- satur smērvielas un Žāvēšanas aktivatoru
- piemērots visu veidu ūdenim
- saderīgs ar polimēru termoplastiskiem materiāliem
- ieteicams lietot kombinācijā ar ANIOSYME DLM Maxi vai ANIOS DLH

INDIKĀCIJAS

Neitrāls instrumentārija skalošanas līdzeklis automātiskai Apstrādei ar smērvielu efektu. Nodrošina ātru žāvēšanu bez pēdām.

RAKSTUROJUMS

- bezkrāsains, dzidrs šētdums
- pH neatšēaidītam produktam pie 20°C: apm. 2 - 3
- pH 0.2% : apm. 7
- blīvums pie +20°C: apm. 1.012
- neoksidējas



AUTOMĀTISKA
DOZĒŠANA

0,3 līdz 3 ml 1 L

ANIOS RHW

Instrumentārija skalošanas līdzeklis ar lubrikatora efektu

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Koncentrāts profesionālai lietošanai.

Izmanto atšaidītu 0.03 līdz 0.3% aukstā ūdenī (0.3 līdz 3ml koncentrāta uz 1 litru ūdens), atkarībā no mašīnas tipa.

ANIOS RHW var izmantot ar visu veidu ūdeni (neapstrādātu, mīkstinātu, reversi osmotizētu, dejonizētu).

SASTĀVS

Nejonu virsmaktīvās vielas
Izopropanols
Palīgvielas

INFORMĀCIJA

Sekoiet instrukcijām kas norādītas uz iepakojuma (direktīva 99/45 EK0 un DDL.
Uzglabāšanas temperatūra: +5°C līdz +30°C.

IĒPAKOJUMS

2 x 5 L kanna 1813.038

