



ASPIRATION

DENTASEPT®

# Aspiration AF+

## INDIKĀCIJAS

Sūkšanas sistēmu tīrīšana un dezinfekcija zobārstniecības vidē. Savietojams ar dažādām sūkšanas sistēmām. Neveido putas.

## PRIEKŠROCĪBAS

- Neputo
- Trīskārša iedarbība - tīrīšana, katlakmens noņemšana un dezinfekcija
- Pierādīta iedarbība uz bioplēvi saskaņā ar ISO/TS 15883 - 5: 2006
- Ļoti ekonomisks 2% šķīdums: 5L koncentrāta šķīduma = 250L lietošanai gatavā šķīduma
- Efektīvs 15 minūšu laikā - aktīvs pret visiem vīrusiem ar apvalku<sup>1</sup>
- Atšķaidītā veidā nav klasificēts kā bīstams videi
- Klases IIa medicīnas ierīce (Direktīva 93/42/EEK)

<sup>1</sup> Roberta Koha institūts (RKI) iesaka izmantot dezinfekcijas līdzekļus ar ierobežotu virucīdu aktivitāti, lai pārtrauktu infekcijas ķēdi. Saskaņā ar RKI, ierobežota virucīdu aktivitāte (efektīva pret vīrusiem ar apvalku) nozīmē iedarbību uz Vaccinia vīrusu un BVDV.

## MIKROBIOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS PIE 20°C

Baktericīds: EN 1040, EN 13727, EN 14561 - 15 minūtes.  
Pretraugu: EN 1275, EN 13624, EN 14562 - 15 minūtes.  
Tuberkuloģīds: EN 14348, EN 14563 - 60 minūtes. Aktīvs saskaņā ar EN 14476 uz herpes vīrusu, BVDV (HCV aizstājējs), Vaccinia vīrusu - 5 minūtes.

## SASTĀVS

N- (3-aminopropil) -N-dodecilpropān-1,3-diamīns, virsmaktīvo vielu saistīšana, sekvestrējošais līdzeklis, krāsviela un palīgvielas.

## IEPAKOJUMS UN PIEDERUMI

1 litra dozēšanas pudele  
5 litru trauks ar dozēšanas sūkni  
Dentasept® ASP sistēma (424050).



(424050)



ASPIRATION

# DENTASEPT® Aspiration AF+

## PROTOCOL FOR USE

### LIETOŠANAS PROTOKOLS

Sūkšanas sistēmu tīršana un dezinfekcija zobārstniecības vidē. Savietojams ar dažādām atsūkšanas sistēmām. Neveido putas.

#### PIRMS LIETOŠANAS

Valkājiet piemērotus cimdus.

#### LIETOŠANA

Dienas beigās sagatavojiet 2 litrus atšķaidīta šķīduma ar Dentasept®ASP sistēmu.

1. Atšķaidiet 2% koncentrācijā (40 ml uz 2 litriem ūdens).  
1 litra pudele: Uzpildiet izsmidzinātāju līdz 20 ml indikatoram, pēc tam atkārtojiet procedūru.  
5 litru trauks: 2 reizes nospiediet dozēšanas sūkni.
2. Viegli sakratiet Dentasept®ASP sistēmu, lai sajauktu šķīdumu.
3. Daļēji atskrūvējiet melno vāciņu, lai ļautu gaisam iekļūt Dentasept® ASP sistēmā. Piestipriniet sūkšanas sistēmas caurules un aspirējiet atšķaidīto šķīdumu.
4. Atstājiet uz vismaz 15 minūtēm. Šķīdumu var atstāt sūkšanas sistēmā uz nakti.
5. Lai izskalotu sistēmu, uzpildiet Dentasept® ASP sistēmu ar vismaz 1 litru tīra ūdens un aspirējiet.

Jebkura ilgstoša iedarbība augstā temperatūrā (> 35°C) var izraisīt krāsas izmaiņas, nemainot antimikrobiālo iedarbību.

#### PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Bīstams: stingri ievērojiet lietošanas piesardzības pasākumus (izstrādāts saskaņā ar Eiropas noteikumiem par ķīmisko vielu klasifikāciju un marķēšanu). Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet etiķeti un informāciju par izstrādājumu. Tikai profesionālai lietošanai. Klases IIa medicīnas ierīce (saskaņā ar grozīto Direktīvu 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm). Uzglabājiet temperatūrā no +5°C līdz +35°C.

