

# Spirtu saturošs, ātras iedarbības virsmu dezinfekcijas līdzeklis ar putu veidotāju.

## Incidin® Foam

Lietošanai gatavas putas ātrai dezinfekcijai uz spirta pamata.

Plaša spektra iedarbība pret baktērijām (ieskaitot TB) un raugiem.

Augsta dezinfekcijas efektivitāte uz visa veida pret spirtu izturīgām virsmām, pat augsta riska zonās.

Neveidojas aerosols gaisā

Gatavs lietošanai un ar patikamu smaržu

Iekļauts VAH sarakstā



Glucoprotamin®

# Incidin® Foam

Lietošanai gatavas putas ātrai dezinfekcijai uz spirta pamata.

Mūsu sasniegumi	Jūsu ieguvumi
Lietošanai gatavs produkts izsmidzināmā pudelē, ar ātri reaģējošu putas veidojošu šķīdumu un patīkamu smaržu.	Ātra virsmu dezinfekcija un tīrīšana apvienojumā ar drošāku un efektīvāku lietošanu. Patīkams lietošanai ar rokām.
Putu aplikācijām, ar zemu spirta saturu. Nesatur nevēlamus aerosolu propelentus.	Drošāks darbs lietotājam, bez riska ieelpot aerosolu.

IEDARBĪBA	KONCENTRĀCIJA	MINIMĀLAIS EKSPOZĪCIJAS LAIKS (min.)
<b>VAH-saraksts (baktericīds, levurocīds, tuberkulocīds)</b>		
Virsmu dezinfekcija atbilstoši VAH (ieskaitot TB), tīrot mehāniski, tīros un netīros apstākļos apstākļos	neatšķaidīts	5
<b>Virucīdo dezinfekcijas līdzekļu saraksts</b>		
Tests atbilstoši DVV vadlīnijām ar / bez proteīnu slodzes		
ierobežota spektra virucīds* (ietver HIV, HBV, HCV)	neatšķaidīts	1
Rota vīruss	neatšķaidīts	0,5
Adenovīruss	neatšķaidīts	1
Poliomas vīruss SV40	neatšķaidīts	0,5

\*saskaņā ar Roberta Koha instituta (RKI) vadlīnijām 01/2004

Ecolab Europe GmbH  
Richtstrasse 7  
CH-8304 Wallisellen, Zurich  
www.ecolab.com

Ecolab SIA  
Rītausmas iela 11B, Rīga,  
LV - 1058, Latvija,  
Tel. +371 670 63 770



Medicīnas ierīču  
virsmu dezinfekcijai

CE 0297



Spirtu saturošs, ātras  
iedarbības virsmu  
dezinfekcijas līdzeklis

Biocīda inventarizācijas nr. LV: 28032007/3311

## PIELIETOJUMS

Lietošanai gatavs, putas veidojošs šķīdums ar izsmidzinātāju.

Lietojiet produktu uz sausas virsmas. Izsmidziniet no apm. 30 cm attāluma izmantojot 40 ml/m<sup>2</sup>) un ļaujiet nožūt. Samitriniet pilnībā visu virsmu. Gadījumā, ja elektroiekārta darbojas, pārlicinieties, vai sprādzienbīstamības dēļ nav jāatvieno strāva.

Saskaņā ar UVV iesakām lietot aizsargcimdus.

Lietojiet biocīdus uzmanīgi!

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.

## SASTĀVS

100 g šķīduma satur: 20 g 2- propanola; 10 g etanola; 0,2g benzalkonija hlorīdu, 0,01 g Glucoprotamin®

## ATZINUMI

Produkts ir plaši testēts - mikrobioloģiski, virusoloģiski, toksikoloģiski un ekoloģiski.

Pēc Jūsu pieprasījuma, mēs labprāt sniegsim Jums testēšanas atzinumus.

## INFORMĀCIJA PASŪTĪJUMIEM

Produkts	Iepakojums	Produkta kods
Incidin® Foam Pudele	16x 750 ml	30 415 80
Incidin® Foam Kanna	2 x 5 L	30 416 00