

SURFANIOS Premium

Dezinfekcijas līdzeklis
grīdām un virsmām



- Dubultā iedarbība: mazgāšanas līdzekļa un dezinfekcijas līdzekļa darbība vienlaikus
- Aktivitāte pret baktērijām un pelējumiem, kas izolēti no slimnīcas vides
- Produkts nesatur aldehīdu
- Ekotoksikoloģiskās informācijas optimizēšana


INDIKĀCIJAS

Grīdu, sienu, medicīnas iekārtu un neinvazīvo medicīnas ierīču tīrīšana un dezinfekcija.

RAKSTUROJUMS

- Zaļas krāsas šķīdums
- Tīra produkta pH: 11,2
- Ašķaidīta produkta pH (0.25%): apm. 8
- Īpatsvars: 1,007
- Refrakcijas indekss: 1,3587
- Sagatavota darba šķīduma derīguma termiņš 28 dienas

PRODUKTS
JĀATŠĀIDA
20 ml > 8 l

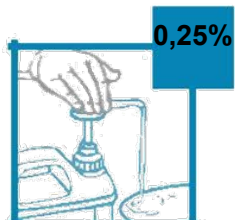





SURFANIOS Premium

Dezinfekcijas līdzeklis grīdām un virsmām


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

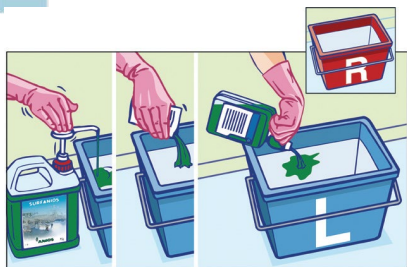

Uzpildiet mazgāšanas spaini un skalošanas spaini ar 8 litriem ūdens. 0,25% atšķaidīšana: iepildiet 20 ml SURFANIOS PREMIUM devu mazgāšanas spainī.

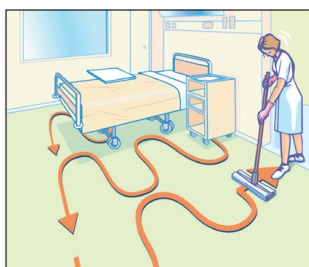

Mazgājiet, kā parādīts attēlā – virzienā no sienas uz durvīm. Skalošana nav nepieciešama, ja vien apstrādes vietai nav saskares ar ādu vai gļotādu.

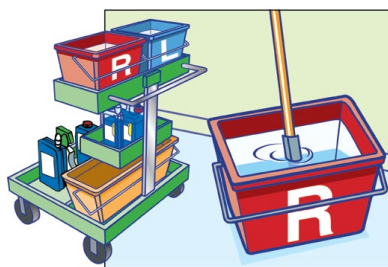

Pirms iemērkšanas mazgāšanas spainī izskalojiet un izgrieziet mopa galvu. (Nebrauciet ar mazgāšanas ratiņiem istabā, atstājiet tos gaitenī.)



Pēc katras telpas tīrīšanas nomainiet mopa galvu un nomainiet mazgāšanas un skalošanas šķīdumu. Novietojiet netīro mopa galvu tam paredzētajā traukā.

SASTĀVS

N- (3-aminopropil) -N-dodecilpropān-1,3-diamīns - CAS Nr. 2372-82-9 (51 mg/g) didecildimetilamonija hlorīds CAS Nr. 7173-51-5 (25 mg/g), palīgvielas.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Bīstams - ievērot lietošanas piesardzības pasākumus (Izgatavots saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas noteikumiem par ķīmisko produktu klasifikāciju un marķēšanu). Izmantojiet biocīdos produktus piesardzīgi. Pirms katras lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu. Uzglabāt temperatūrā no + 5 °C līdz + 35 °C. Biocīdais produkts, ko izmanto virsmu (1. grupa-PT 2) un IIa klases medicīnas ierīču dezinfekcijai - paredzēts profesionālai lietošanai..

IEPAKOJUMS

SURFANIOS Premium

- 500 dozes, 20 ml katrā..... Ref. 1917.129
- 12 dozēšanas pudeles, 1l katrā..... Ref. 1917.092
- 4 kannas pa 5 litriem ar 1 dozēšanas sūkni 20 ml..... Ref. 1917.036

MIKROBIOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Aktīvs pret	Standarts	Kontakta laiks
Baktērijām	EN 1040, EN 13727, EN 1276	5 min.
	EN 13697	30 min./0.25%
	MdRB saskaņā ar EN 1276	15 min./0.5%
	MdRB saskaņā ar EN 13697	5 min.
Mikobaktērijām	<i>Mycobacterium terrae</i> : EN 14348, EN 14563	15 min.
		60 min./ 0,25%
Raugiem	EN 1275, EN 13624, EN 1650	15 min.
	EN 13697	30 min./0.25%
Pelējumu		15 min./0.5%
	EN 1275	15 min.
	EN 1650	120 min.
Vīrusiem	EN 13697	30 min.
	HIV-1, PRV (HBV surogātors), BVDV (HCV surogātors), HSV, Rotavīruss, Vaccinia vīruss	5 min.
	Corona vīruss (SARS surogātors)	15 min.

Produkta antimikrobiālās aktivitātes pilns apraksts ir iekļauts zinātniskajā dokumentācijā, kas pieejama pēc pieprasījuma.

