

WIP'ANIOS Excel

- * 100% bioloģiski noārdāmas viskozes salvetes.
- * Piesūcinātais šķīdums: nesatur CMR vielu, smaržvielas un alkoholu.
- * Plašs virucīdu spekts



Vienreizējās lietošanas salvetes

Indikācijas

Invazīvu un neinvazīvu medicīnas ierīču apstrādei. Endoskopa apvalku noslaucīšana sākotnējās apstrādes laikā pirms iegremdēšanas tīrīšanas un dezinfekcijas šķīdumā. Piemēri: ultraskaņas zondes, spiediena sensori, glikozes testerī, asinsspiediena mērītājs, refleksi āmuri utt. WIP'ANIOS Excel salvetes ir piesūcinātas ar mazgāšanas un dezinfekcijas šķīdumu medicīnas instrumentu apstrādei.

Raksturlielumi

- Sastāvs: 100% viskoze (spunlace 50 gr/m²)
- Salvetes izmērs: 180 x 200 mm
- Piesūcinātais šķīdums: 5 ml SURFA'SAFE premium vienā salvetē
- pH ap 6,0
- Saudzējošs pret zondes gumijas aizsargslāni skaņas kūļa priekšējā daļā, novērš gumijas sprēgāšanu.

Sastāvs

Piesūtinātā šķīduma sastāvā ietilpst didecildimetiamonija hlorīds, (CAS No 7173-51-5: 3 mg/g), nejonu virsmaktīvās vielas, izolējošais līdzeklis, palīgvielas.

Lietošanas instrukcija



Paņemiet salveti un aizveriet ciet iepakojumu. Apstrādājiet ar salveti apstrādājamās zonas. Nepieciešamības gadījumā paņemiet otru salveti. Ievērojiet saskarsmes laiku, atkarībā no vēlamās darbības. Ļaujiet nožūt. Pēc lietošanas nav nepieciešamības skalot, arī gadījumos, kad medicīnas instrumentu paredzēts izmantot saskarsmē ar gļotādu. Cieši aizveriet iepakojumu pēc katras atvēršanas. Neizmantojiet salveti vairākkārtīgi. Dezinfekcija vairs nebūs garantēta.

Piesardzības pasākumi lietošanai

Bīstami – ievērot piesardzības pasākumus lietošanai (sagatavoti, saskaņā ar direktīvu 99/45/EK un tās pielikumiem). Uzglabāt temperatūrā no +5°C līdz +35°C. IIb klase, saskaņā ar medicīnas ierīču direktīvu 93/42/EEK un tās grozījumiem.

Mikrobioloģiskās īpašības

Iedarbība pret	Standarti	Saskarsmes laiks
Baktērijām	EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 114561	3 minūtes
	EN13727 (iesk. ERV, A.baumanii βLSE, E coli OXA 48, E.Cloacae OXA 48, K.pneumoniae OXA 48, SARM)	1 minūtes
	EN13697 -ERV, A.baumanii βLSE, E coli OXA 48, SARM	2 minūtes
Mikobaktērijām	Mikobaktēriju tuberkuloze (Tb)	15 minūtes
Raugu sēnītēm	EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN14562	5 minūtes
Pelējumiem	EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN14562	20 minūtes
Vīrusiem	HIV-1, BVDV (HCV surogāts), PRV (BHV surogāts), Vakcīnija vīruss, rotavīruss, herpesvīruss, VRS	1 minūte
	Poliomavīruss SV40	5 minūtes
	Norovīruss	30 minūtes

Iepakojums

* 6 iepakojumi, katrā 100 salvetes Nr. 2088.655

* 12 iepakojumi, katrā 50 salvetes Nr. 2088.424